

Systeme™

lubrikáló szemcsepp

COMPLETE

Kérjük, körültekintően olvassa el, és a későbbi felhasználáshoz tartsa meg a használati útmutatót!

Leírás

A SYSTANE™ COMPLETE lubrikáló szemcsepp steril, fehér emulzió, ami propilén-glikolt, hidroxipropil-guárt, ásványi olajat, dimirisztoil-foszfatidil-glicerint, polioxil 40 sztearátot, szorbitán-trisztearátot, bórsavat, szorbitot, nátrium-edetátot, POLYQUAD™ (polidronium-klorid) 0,001% tartósítószerrel és tisztított vizet tartalmaz. A pH beállítása érdekében sósavat és/vagy nátrium-hidroxidot tartalmazhat.

A SYSTANE COMPLETE lubrikáló szemcsepp alkalmazás előtti, külső megjelenése természetéből adódóan fehér.

Rendeltetészerű alkalmazás/Javallatok

A SYSTANE COMPLETE lubrikáló szemcsepp a száraz szem kezelésére szolgál, átmenetileg megszünteti a szemszárazság okozta égő érzést és irritációt.

Ellenjavallatok

A SYSTANE COMPLETE lubrikáló szemcsepp bármelyik összetevőjével szembeni allergia esetén a termék használata ellenjavallt!

Alkalmazás

A SYSTANE COMPLETE lubrikáló szemcsepp egész nap, szükség szerint alkalmazható a száraz szem okozta tünetek enyhítésére. Alkalmazható a kontaktlencse behelyezése előtt és kivételét követően. **Alkalmazás előtt alaposan fel kell rázni!** Szükség szerint cseppentsen egy vagy két cseppet a szem(ek)be, és pislogjon.

Figyelmeztetések

Fontos, hogy a készítmény megfelelő alkalmazása érdekében mindenben kövesse a szemészeti szakember előírásait és a használati útmutatóban leírtakat.

Amennyiben tartósan fennálló, kellemetlen érzést tapasztal a szemében, vagy fokozott könnyezést, fejfájást, látászavart vagy szemvörösséget észlel, hagyja abba a SYSTANE COMPLETE alkalmazását, és forduljon szemészeti szakemberhez, mivel a probléma súlyosabbá válhat.

Átmeneti homályos látás vagy egyéb látászavarok befolyásolhatják a gépjárművezetéshez vagy a gépek kezeléséhez szükséges képességeket. Ha az alkalmazást követően homályos látás jelentkezik, várjon, amíg a látása kitisztul, mielőtt gépjárművet vezetne vagy gépet kezelne.

Óvintézkedések


- Kizárólag szemészeti alkalmazásra!
- A beszennyeződés elkerülése érdekében a flakon cseppentőjét soha ne érintse hozzá semmihez.
- Ne alkalmazza, ha az emulzió elszíneződött!
- Használat után csavarja vissza a kupakot.
- Ne tárolja 2°C alatt. Legfeljebb 30°C-on tárolandó.
- Használaton kívül tartsa szorosan zárva a flakont!
- A készítményen jelzett lejárati időn belül használja fel!
- **FELBONTÁSVÉDELEM:** Ne alkalmazza, ha a biztonsági zárógyűrű sérült vagy hiányzik! Ne alkalmazza, ha a csomagolás bontott vagy sérült!
- A felbontás után legfeljebb három hónapig alkalmazható. A felbontás után három hónappal a megmaradt terméket dobja ki!
- Gyermekektől elzárva tartandó!
- Lenyelés esetén forduljon orvoshoz!


Kiszerezés

A SYSTANE COMPLETE lubrikáló szemcsepp 4 ml-től 10 ml-ig terjedő méretű műanyag flakonban (és ezekből több flakont tartalmazó gyűjtőcsomagolásban) kerül forgalomba.

STERILE A

Forgalmazza:
Alcon Hungária Kft.
1114 Budapest,
Bartók Béla út 43-47.

 Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, 76134-2099 USA

 Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amunds
Belgium

 0123

Systeme™

Picături oftalmice lubrifiante
COMPLETE

Citiți cu atenție acest prospect și păstrați-l pentru utilizarea viitoare.

Descriere

Produsul SYSTANE™ COMPLETE Picături oftalmice lubrifiante este o emulsie sterilă, de culoare albă, care conține propilenglicol, hidroxipropil guar, ulei mineral, dimiristoil fosfatidilglicerol, polioxil 40 stearat, sorbitan tristearat, acid boric, sorbitol, edetat disodic, conservant POLYQUAD™ (clorură de polidroniu) 0,001% și apă purificată. Este posibil să conțină acid clorhidric și/sau hidroxid de sodiu pentru ajustarea pH-ului.

SYSTANE COMPLETE Picături oftalmice lubrifiante are un aspect natural de culoare albă înainte de aplicare.

Utilizarea propusă/Indicații

Produsul SYSTANE COMPLETE Picături oftalmice lubrifiante reprezintă un tratament pentru sindromul de ochi uscat, în scopul ameliorării temporare a senzației de arsură și iritație cauzate de uscăciunea ochiului.

Contraindicații

Persoanele alergice la oricare dintre componentele produsului SYSTANE COMPLETE Picături oftalmice lubrifiante nu trebuie să utilizeze acest produs.

Instrucțiuni

Produsul SYSTANE COMPLETE Picături oftalmice lubrifiante poate fi utilizat după cum este necesar pe durata întregii zile pentru ameliorarea simptomelor sindromului de ochi uscat. Produsul poate fi utilizat înainte de plasarea lentilelor de contact și după îndepărtarea acestora. **A se agita bine înainte de utilizare.** Instilați una sau două picături într-unul sau în ambii ochi, după cum este necesar, apoi clipiți.

Atenționări

Este esențial să respectați instrucțiunile furnizate de specialistul dumneavoastră în îngrijirea ochilor, precum și totalitatea instrucțiunilor cuprinse în etichetare în vederea utilizării corespunzătoare a produsului.

În cazul în care prezentați disconfort ocular persistent, lăcrimare excesivă, cefalee, modificări ale vederii sau roșeață a ochilor, întrerupeți utilizarea produsului SYSTANE Complete și consultați-l pe specialistul dumneavoastră în îngrijirea ochilor, deoarece problema se poate agrava.

Încețoșarea temporară a vederii sau alte tulburări de vedere pot avea influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. În cazul în care după aplicarea produsului apare încețoșarea vederii, așteptați până când vederea redevine clară înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Precauții

- Numai pentru utilizare la nivel ocular.
- Pentru evitarea contaminării, nu atingeți niciodată vârful picurător al recipientului de nicio suprafață.
- A nu se utiliza în cazul modificărilor de culoare ale emulsiei.
- Puneți la loc capacul după utilizare.
- A nu se păstra la temperaturi sub 2 °C. A nu se păstra la temperaturi peste 30 °C.
- Păstrați recipientul bine închis când nu este utilizat.
- A se utiliza înainte de data de expirare înscrisă pe produs.
- SIGILIU: A nu se utiliza dacă sigiliul de siguranță este deteriorat sau absent. A nu se utiliza dacă ambalajul a fost deschis sau deteriorat.
- Poate fi utilizat timp de până la trei luni după deschidere.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- În caz de înghițire, solicitați asistență medicală.

Mod de prezentare

Produsul SYSTANE COMPLETE Picături oftalmice lubrifiante este furnizat în flacoane din plastic cu mărimi cuprinse între 4 ml și 10 ml (și flacoane multipli ai acestora).

STERILE

Distribuit de:
Alcon România SRL
B-dul Barbu Văcărescu nr. 301-311,
etaj 5, Sector 2, 020276 București, România
Tel: +40 21 203 93 01
Fax: +40 21 203 93 00

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, 76134-2099 USA

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium

